

Varios series

バリオス2ハンドピース



スケーリング

G11 先端が細くなっていますので、前歯などの比較的小さな部位、または小型犬や猫のスケーリングに適しています。

標準付属



製品名 **G11** 製品番号 **Z217411** 標準価格 **¥8,400**


使用最大パワー **G 6**



上顎前歯の例

G13 最も使用頻度の高い標準的なチップです。犬のスケーリング全般にお使いいただけます。

標準付属

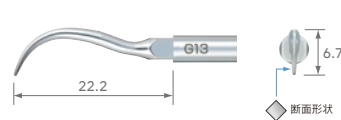

製品名 **G13** 製品番号 **Z217413** 標準価格 **¥8,400**


使用最大パワー **G 6**



上顎白歯の例

G2 歯肉縁上に付着した大量の歯石除去に適したチップです。平らな断面を歯石にあて、歯面の形状にあわせて動かします。

オプション

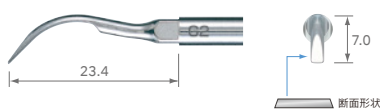


製品名 **G2** 製品番号 **Z217102** 標準価格 **¥8,400**

使用最大パワー **G 7**

G3 先端が丸い形状になっていて、歯肉縁上に付着した大量の歯石除去に適したチップです。

オプション

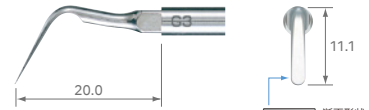

製品名 **G3** 製品番号 **Z217103** 標準価格 **¥8,400**

使用最大パワー **G 7**

G4 先端が細く歯肉辺縁や縁上のスケーリングに適したチップです。断面が丸く歯面にキズが付きにくい形状です。

オプション




製品名 **G4** 製品番号 **Z217104** 標準価格 **¥8,400**

使用最大パワー **G 5**

ペリオ

P1

オプション

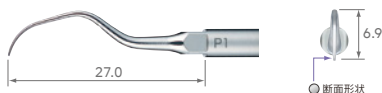

製品名 **P1** 製品番号 **Z217404** 標準価格 **¥9,000**

使用最大パワー **P 6**

スケーリングの仕上げに適したストレートタイプのチップです。とても細いのでポケット内・隣接面・叢生部へも無理なくアクセスできます。断面が丸く歯面にキズが付きにくい形状です。

P10

オプション



製品名 **P10** 製品番号 **Z217410** 標準価格 **¥9,000**


使用最大パワー **P 10**

シャープエッジタイプのチップで、ポケット内へのアクセスがスムーズに行えるので全顎的に使用でき、硬い歯石の除去などに効果的なチップです。


G 6 : 左記の記号と数値は、各チップにおける使用最大パワーモードと数値を示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

■必ず十分な注水下で行ってください。上記以外にもオプションとして各種チップを取り揃えております。

熱水洗浄可能 135℃ 135℃までの温度でオートクレープ可能

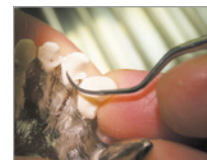

上顎前歯の例

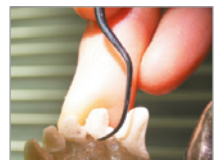

上顎前歯の例

歯根膜剥離

G90 スタンダード

標準付属



製品名 G90 製品番号 Z217700 標準価格 ¥13,700

使用最大パワー **G 6**

歯根膜剥離チップは、抜歯時の顎骨折や破折等のリスクを大幅に軽減。チップの形状を細く、且つエッジの両側面を鋭くすることで、術部へのアクセス性を高め、繊細な操作が求められる難抜歯においても安全な施術をサポートします。

G90S ショート

オプション




製品名 G90S 製品番号 Z217701 標準価格 ¥13,700

使用最大パワー **G 6**



重度の歯槽骨吸収のある歯
薄くなった下顎骨の医原性骨折のリスクを軽減し安全に抜歯することが可能

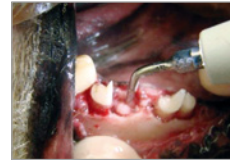

骨性癒着歯
歯槽骨の過剰な組織破壊を軽減でき、骨性癒着部位を平滑に剥離することが可能



下顎犬歯残根歯
残根周囲歯槽骨を過剰に切削することなく歯槽骨形態の保持が可能

切削・形成用

G61D

オプション




製品名 G61D 製品番号 Z217601 標準価格 ¥12,600

使用最大パワー **G 2**

ダイヤモンドコーティングされたチップは、抜歯後の骨棘平滑化及び不良肉芽の掻扱に最適。回転切削と比べ、低侵襲で骨切削でき、軟組織を損傷するリスクも軽減します。

G62D

オプション

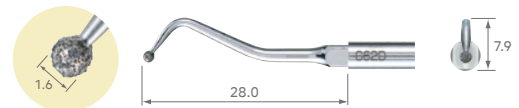

製品名 G62D 製品番号 Z217602 標準価格 ¥12,600


使用最大パワー **G 2**



ダイヤモンドチップ(G61DもしくはG62D)を装着し、十分な注水下で抜歯後の歯槽骨縁の骨棘を平滑化。



抜歯した全ての歯槽骨縁の骨棘をダイヤモンドチップで平滑にし、同時に不良肉芽の掻扱を実施。

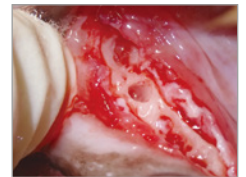

歯槽骨縁の平滑後、吸収性縫合糸で歯肉同士を縫合して終了。

尿道結石用

E50

オプション

尿道結石用チップは、尿道内の結石を超音波振動で破砕する細くて挿入がスムーズなチップです。



製品名 E50 製品番号 Z217050 標準価格 ¥5,300

パワーレンジ **P Min~Max** パワーレンジ **E Min~Max**

<尿道結石用チップ使用に際しての注意>

- 尿道結石用チップE50は、低い出力(モード設定キー **P** または **E**)からお使い下さい。高い出力だと粘膜を傷つける恐れがあります。

【チップの使用に際しての注意】

- ・必ず添付文書および取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ・チップのパワー設定は目的や症例に合わせて、各チップに適したモードとパワー数値でご使用ください。
- ・各モードのパワーレベルについてはパワーモード比較表をご覧ください。
- ・口腔内の状態や症例、歯石の沈着量を確認しながら低いモード・パワーから使用し状態に応じてモード・パワーを上げて行くことをお勧めいたします。
- ・チップは振動により発熱しますので、目的や症例によっては十分な注水下でご使用ください。

指定されたパワー以下で使用した場合でも、使い方によっては破折することがあります。

■バリオス350 / 560 / 750 でご使用される場合、最大出力が異なります。
それぞれの添付文書および取扱説明書でご確認ください。

POWER RANGE

iPiezo engine[®] Varios2

G	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

株式会社ナカニシ www.nsk-veterinary.com

本 社 ・ 工 場 | 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
東京事務所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F
大阪事務所 | 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F
仙台事務所 | 〒984-0046 仙台市若林区二軒茶屋1-6 二軒茶屋エスコムビル201号
福岡事務所 | 〒812-0004 福岡市博多区榎田2-4-72 RS空港南4号室

TEL:0289-64-3433 FAX:0289-64-3444
TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218
TEL:022-794-8783 FAX:022-794-8784
TEL:092-472-6366 FAX:092-472-6367

お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間9:00~17:00(平日のみ) 製品に関するご意見・ご質問などお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。



取扱販売店